

Impressora 3D NextDent® 5100

por  3D SYSTEMS®

Parabéns pela sua aquisição da impressora 3D NextDent 5100 da 3D Systems! Estamos confiantes de que aproveitará os diversos benefícios da impressão 3D em casa durante anos com o seu novo sistema NextDent, à medida que experimenta a qualidade e complexidade ilimitada integrada das peças físicas que ele produz. Você descobrirá que essa impressora atende todas as suas necessidades para construção de modelos odontológicos e peças de uso final biocompatíveis.

Verifique a embalagem da sua NextDent 5100 e certifique-se de que os seguintes itens estão inclusos no envio da sua impressora.

- | | | | | | |
|----------|---|--|----------|--|--|
| A |  | Plataforma de impressão (x2)
A peça impressa em 3D adere à plataforma de impressão durante a construção. | I |  | Misturador de resina
Usado para misturar a resina líquida na bandeja de resina. |
| B |  | Bandeja de resina
Contém o material de impressão durante a construção da peça. | J |  | Filtro de entrada (instalado na impressora)
Mantém a poeira fora da impressora enquanto fornece ar ao ventilador de resfriamento. |
| C |  | Garagem da bandeja de resina
Usada para cobrir uma bandeja de resina que contém resina, para protegê-la contra a exposição à luz UV. | K |  | Nivelador
Usado para nivelar a impressora no pedestal opcional |
| D |  | Bandeja de captura (instalada na impressora)
Evita que derramamentos de resina entrem na câmara de construção inferior. | L |  | Ferramenta de punção
Usada para remover a peça impressa da plataforma de impressão por baixo e para limpar os orifícios da plataforma de impressão com resina parcialmente curada. |
| E |  | Cabo Ethernet
Para conectar a impressora à rede. | M |  | Filtro de carbono
Evita que vapores do material de impressão saiam da câmara de processamento. |
| F |  | Cabo de alimentação (na parte superior da caixa de acessórios)
Para conectar a impressora à fonte de alimentação. O cabo de alimentação é específico para cada país. | N |  | Pincel de limpeza da peça
Para auxiliar na limpeza/lavagem da peça impressa. |
| G |  | Espátula da plataforma
Usada para remover peças de construção da plataforma de impressão. | O |  | Acessório de limpeza da plataforma
Usado para segurar a plataforma de impressão em um tubo de solvente durante a limpeza da plataforma. |
| H |  | Luvas de nitrilo – (100 pares, grande)
Usadas para proteger as mãos contra resina líquida não curada e solventes de limpeza. | P |  | Escova metálica
Usada para limpar as plataformas de impressão que manusearam as resinas Ortho IBT ou Gingiva Mask. |

Obrigado por escolher a impressora 3D NextDent 5100 da 3D Systems!